


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Philips Eagle Eye Platinum ST катетер ротационный
(philips-eagle-eye-platinum-st)**

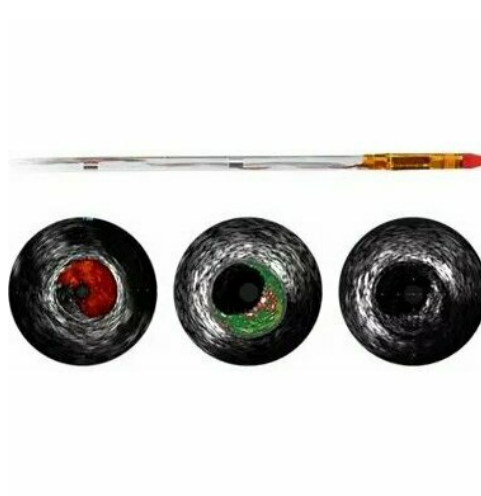

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-eagle-eye-platinum-st

Характеристики товара

Фото philips-eagle-eye-platinum-st

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Eagle Eye Platinum ST катетер ротационный

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST имеет расстояние между кончиком катетера и системой датчиков, передающих изображение, равное 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами диаметром 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.

Технические характеристики

Применение:	Для эхографии
Часть тела:	Коронарный, периферийный
Варианты:	Гидрофильный
Максимальный диаметр проводника:	0,014 дюйма (0,036 см)
Рабочая длина:	150 см
Максимальный диаметр визуализации:	20 мм
Частота:	20 МГц
Минимальный диаметр проводникового катетера:	5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)

Особенности

- Катетер Eagle Eye Platinum ST обеспечивает усовершенствованную доставляемость в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum в модели извитых сосудов.
- Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и сплошная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию с помощью ВСУЗИ. Конструкция не требует использования электропривода и устройства для протяжки проводника, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
- Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает улучшенное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

скольжение и износостойкость во время использования. Сужающийся кончик и система доставки с быстрой сменой проводника облегчают проталкивание.

- Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.
- Как и проводник Eagle Eye Platinum, проводник модели ST совместим с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056 дюйма. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях, когда катетер для ВСУЗИ необходимо использовать вместе с другими проводниками в составе более крупного проводника. Например, катетер Eagle Eye Platinum можно использовать с микрокатетером Terumo Finecross в проводнике диаметром 7 F.
- Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при совмещении изображений с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
- Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
- Визуализация с помощью ВГ-ВСУЗИ позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета и сосуда. Технология ВГ-ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%.
- Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Eagle Eye Platinum ST катетер ротационный

Артикул

philips-eagle-eye-platinum-st

Наименование устройства

Philips Eagle Eye Platinum ST катетер ротационный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Eagle Eye Platinum ST катетер ротационный

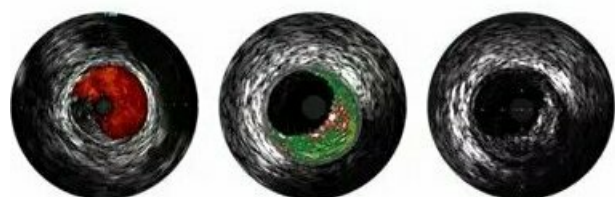

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>